

Favor ler cuidadosamente e guardar esta bula para uso futuro.

Opti-Free RepleniSH*

Solução de Desinfecção Multi-Propósito
Para lentes de contato gelatinosas e Silicone-Hidrogel
ESTÉRIL

RETÉM A HIDRATAÇÃO INTENSIFICANDO O CONFORTO
SEM FRICÇÃO

Limpa
Reidrata
Enxágua
Desinfeta
Conserva

DESCRIÇÃO

OPTI-FREE REPLENISH SDMP é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio, cloreto de sódio, borato de sódio, propilenoglicol, TEARGLYDE*, um duplo sistema de ação reidratante exclusivo composto por TETRONIC* 1304 e ácido nonanoil etilenodiaminotriacético, com POLYQUAD® 0,001% (Poliquaternium-1) e ALDOX* 0,0005% (miristamidopropil dimetilamina) como conservantes.

AÇÕES

Sempre quando utilizado conforme indicação, OPTI-FREE REPLENISH SDMP:

- Limpa através do desprendimento e remoção de proteínas, depósitos e resíduos das lentes durante a desinfecção e armazenamento.
- Elimina microorganismos prejudiciais (germes) da superfície das lentes.

É usado para enxaguar e armazenar lentes Silicone-Hidrogel e todas as lentes gelatinosas (hidrofílicas).

Esta solução é formulada para ser utilizada na desinfecção e armazenamento de lentes por no máximo 30 dias.

O uso de um limpador enzimático não é necessário quando o OPTI-FREE REPLENISH SDMP é utilizado diariamente.

Não utilizar solução salina com OPTI-FREE REPLENISH SDMP.

INDICAÇÕES (USOS)

Para o uso diário na limpeza, reidratação, enxágüe, remoção de depósitos de proteínas, desinfecção química (não térmica), e conservação de lentes Silicone-Hidrogel e todas as lentes gelatinosas, de acordo com o recomendado por seu oftalmologista.

CONFORTO E BENEFÍCIOS DE HIDRATAÇÃO NO USO DE LENTES DE CONTATO

Enquanto as lentes estão no estojo, OPTI-FREE REPLENISH SDMP reidrata diariamente a superfície das lentes através da adsorção de um sistema exclusivo de umectação que permite que uma fina camada de hidratação, proveniente das lágrimas, se mantenha na superfície das lentes ao longo do dia. Isto permite a formação de uma camada hidratante contínua entre a lente e o olho, proporcionando conforto durante todo o dia através da manutenção da hidratação da lente. Esta camada hidratante na superfície das lentes ajuda a manter a aparência de olhos saudáveis (livres de irritação) em muitos pacientes.

Aumenta o conforto para usuários de todas as lentes gelatinosas que normalmente relatam desconforto.

Reidrata as lentes a fim de manter a sua camada hidratante, proporcionando a muitos pacientes uma visão nítida ao fim do dia.

CONTRA-INDICAÇÕES (Razões para não usar)

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes deste produto não devem utilizá-lo.

INSTRUÇÕES GERAIS

- Remover o lacre em volta do frasco antes do uso.
- Sempre lavar e enxaguar as mãos antes de manusear suas lentes de contato.
- Limpar, reidratar, enxaguar e desinfetar suas lentes toda vez que removê-las.
- Manusear sempre uma lente de cada vez, direita ou esquerda, para evitar trocas.
- Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, enxaguá-lo com OPTI-FREE REPLENISH SDMP e deixá-lo secar ao ar.

Instruções para o cuidado de suas de lentes de contato com OPTI-FREE REPLENISH Solução de Desinfecção Multi-Propósito

Para limpar, reidratar, desinfetar e remover proteínas de suas lentes de contato:

- Enxaguar completamente cada lado da lente por 5 segundos com OPTI-FREE REPLENISH SDMP.

· Preencher seu estojo para lentes com OPTI-FREE REPLENISH SDMP. Armazenar as lentes no estojo fechado durante a noite ou por pelo menos 6 horas. Após a conservação no estojo, as lentes estão prontas para o uso.

Se algum resíduo permanecer nas lentes de contato enxágüe com OPTI-FREE REPLENISH SDMP antes de colocá-las. Você pode deixar as suas lentes armazenadas no estojo fechado contendo OPTI-FREE REPLENISH SDMP por no máximo trinta dias. Após este período, as lentes devem ser limpas e desinfetadas novamente com uma solução nova de OPTI-FREE REPLENISH SDMP a cada trinta dias e sempre antes de usar suas lentes.

Seus olhos são únicos. Seu oftalmologista pode recomendar a utilização de produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e no seu horário de uso das lentes. Sempre siga as instruções de seu oftalmologista e não altere os cuidados de suas lentes sem consultá-lo.

Se seu oftalmologista recomendar que você friccione suas lentes, coloque algumas gotas da solução diretamente nas lentes e friccione por alguns segundos, e siga as instruções descritas anteriormente.

ADVERTÊNCIAS

É essencial que você siga as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções de rotulagem para o uso apropriado e cuidado de suas lentes e dos produtos que são utilizados para o seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar **IMEDIATAMENTE** as lentes e consultar seu oftalmologista, pois o problema pode se tornar mais sério.

PRECAUÇÕES

- Sempre utilizar uma solução nova de Opti-Free RepleniSH SDMP. Nunca reutilizar a solução do seu estojo para lentes.
- Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em qualquer superfície.
- Recoloque a tampa após o uso.
- Manter o frasco bem fechado quando não estiver em uso.
- Conservar em temperatura ambiente. Manter o frasco na posição vertical.
- Utilizar a solução antes do prazo de validade marcado na embalagem.
- Após a abertura do frasco, a solução deve ser utilizada no prazo máximo de 6 meses.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar para desinfecção térmica.

APRESENTAÇÕES

Frasco plástico contendo 60, 90 ou 300 ml de solução.

Aprovado pela SOBLEC – Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração.

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.

Reg. ANVISA nº 80147540149

Fabricado por:

ALCON LABORATORIES, INC.

Fort Worth, Texas, EUA

Importado por:

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. das Nações Unidas, 12.495 3º andar 04578-902 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0001-00

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP N° 8066

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 7077908

sacbrasil@alconlabs.com

* ALDOX é uma marca de Alcon, Inc.

OPTI-FREE REPLENISH é uma marca de Alcon, Inc.

TEARGLYDE é uma marca de Alcon, Inc.

TETRONIC é uma marca de BASF Corporation.

© 2006 Alcon, Inc.

ALCON

Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.

www.alconlabs.com.br

www.opti-free.com.br