

Favor ler cuidadosamente e guardar esta bula para uso futuro.

## **OPTI-FREE EXPRESS®**

Solução de Desinfecção Multi-Propósito

Conforto Prolongado

Sem Fricção

### **DESCRIÇÃO:**

**OPTI-FREE EXPRESS Solução de Desinfecção Multi-Propósito** contém os ingredientes POLYQUAD® e ALDOX\* que destroem os microrganismos nocivos, mas não irritam os olhos. Também contém citrato, que remove depósitos de proteínas enquanto suas lentes são conservadas no estojo sem necessidade de friccioná-las.

**OPTI-FREE EXPRESS SDMP** proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para os olhos sensíveis.

**OPTI-FREE EXPRESS SDMP** umidifica suas lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto durante o uso das lentes.

**OPTI-FREE EXPRESS SDMP** é indicado para desinfetar, limpar, enxaguar, lubrificar e conservar todas as lentes de contato, incluindo as de silicone-hidrogel.

### **COMPOSIÇÃO:**

**OPTI-FREE EXPRESS SDMP** é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém cloreto de sódio, sorbitol, edetato dissódico, ácido bórico, aminometilpropanol; citrato e TETRONIC\* 1304 como agentes de limpeza e POLYQUAD® 0,001% (Poliquaternium-1) e ALDOX\* 0,0005% (miristamidopropil dimetilamina) como conservantes.

### **CONTRA-INDICAÇÕES (Razões para não usar):**

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de **OPTI-FREE EXPRESS SDMP** não devem utilizar este produto.

## **INSTRUÇÕES GERAIS:**

- Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato. Sempre manusear primeiro a mesma lente, a direita ou a esquerda, para evitar troca das lentes.
- Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com **OPTI-FREE EXPRESS SDMP** antes de usar, para eliminar qualquer resíduo.
- Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, enxaguá-lo com **OPTI-FREE EXPRESS SDMP** e deixá-lo secar ao ar. A Alcon recomenda trocar o estojo para lentes frequentemente.

## **INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR E REMOVER PROTEÍNAS:**

Enxaguar completamente cada lado da lente por 5 segundos com **OPTI-FREE EXPRESS SDMP**. Encher seu estojo para lentes com **OPTI-FREE EXPRESS SDMP** suficiente para cobrir as lentes. Deixar as lentes no estojo fechado durante a noite ou por pelo menos 6 horas. Após a conservação no estojo, as lentes estão prontas para o uso.

Seu oftalmologista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes. Sempre seguir as instruções de seu oftalmologista.

Você pode deixar as lentes guardadas no estojo fechado por no máximo trinta dias. Se suas lentes forem guardadas por períodos maiores, elas devem ser limpas e desinfetadas novamente com uma solução nova a cada trinta dias e antes de usar.

## **UMIDIFICAÇÃO:**

Se pequenas irritações, desconforto ou embaçamento ocorrer durante o uso das lentes de contato, pingar uma ou duas gotas de uma solução umidificante como **CLENS-100 Gotas Umidificantes** diretamente nos olhos e piscar duas ou três vezes. **CLENS-100 Gotas Umidificantes** pode ser utilizado para umidificar as lentes quando for necessário durante o dia.

## **ADVERTÊNCIAS:**

É essencial seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para

seu cuidado, inclusive o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar **IMEDIATAMENTE** as lentes e consultar seu oftalmologista, porque o problema pode tornar-se mais sério.

### **PRECAUÇÕES:**

- Sempre usar uma solução nova de **OPTI-FREE EXPRESS SDMP**. Nunca reutilizar a solução do seu estojo para lentes.
- Sempre utilizar um estojo para lentes.
- Para evitar contaminação não tocar o conta-gotas em qualquer superfície.
- Tampar após o uso.
- Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
- Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.
- Usar antes da data de validade marcada no produto.
- Descartar o restante da solução após seis meses da abertura do frasco.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não usar para desinfecção térmica.

### **APRESENTAÇÕES:**

**OPTI-FREE EXPRESS Solução de Desinfecção Multi-Propósito** é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 120 ml e 355 ml. **(ESTÉRIL)**

Embalagem com ou sem estojo para lentes.

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.

MS-10002390097

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP N° 8066

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. N. S. da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 707 7908

\*Aldox é uma marca de Alcon, Inc.

\*Clens-100 é uma marca de Alcon, Inc.

\*Tetronic é uma marca de Basf Corporation.

Aprovado pela SOBLEC – Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea

**ALCON**

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.