

Biofenac

HOT

A EVOLUÇÃO DA BOLSA TÉRMICA



O que é Biofenac HOT?



Biofenac HOT é um adesivo térmico descartável que fornece calor estável e duradouro quando aplicado sobre a área de dor. Ideal para alívio das dores cervicais (pescoço) e lombares (costas). Biofenac HOT também pode ser aplicado nas áreas do ombro e de articulações, bem como para alívio das cólicas menstruais, além de poder ser usado de forma discreta sob a roupa. Biofenac HOT é hipoalergênico e não irrita a pele.

Como Biofenac HOT funciona?

Biofenac HOT é feito de ingredientes térmicos naturais (carbono ativado, água, vermiculita, ferro em pó, resina SAP e cloreto de sódio). Quando aberto o saco selado interno, o contato com o oxigênio presente no ar desencadeia uma reação química com o carbono do produto e aquece gradualmente o adesivo térmico descartável em 30 minutos, mantendo o calor de forma confortável por 8 horas.

Instruções de uso de Biofenac HOT:

- 1 - Abra o saco selado interno e remova o filme protetor do adesivo térmico descartável.
- 2 - Aplique o adesivo térmico descartável diretamente sobre a pele da região afetada, pressionando firmemente, com o lado colante voltado para a pele.
- 3 - Use o adesivo térmico descartável sobre a pele limpa e seca. O adesivo térmico descartável inicia o aquecimento em 5 minutos e alcança o calor máximo em 30 minutos, com duração de 8 horas. O adesivo térmico descartável pode ser facilmente removido após o uso.

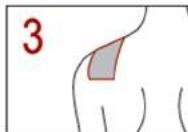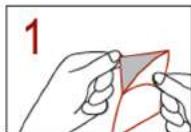

Contraindicações

NÃO USAR Biofenac HOT nas seguintes condições:

- Enquanto dorme.
- Na face, em mucosas e na pele não íntegra (em cortes, hematomas ou áreas inchadas).
- Sobre a pele com cremes ou com medicamento.
- Se o adesivo térmico descartável estiver danificado ou rasgado.
- Não utilize o adesivo térmico descartável com pressão contínua sobre o mesmo.
- Se você for diabético ou gestante ou se tiver problemas de circulação, lesão neurológica, alergias na pele. (Consulte seu médico antes de usar Biofenac HOT).
- Crianças e pessoas que não são capazes de retirar o adesivo térmico descartável sozinhas (idosos, deficientes e incapazes).
- Não utilizar o adesivo térmico descartável por mais de 8 horas e não mais de 1 adesivo térmico descartável em 24 horas.
- Não reutilizar o adesivo térmico descartável.
- Não tentar aquecer o adesivo térmico descartável em forno ou micro-ondas.
- Não cortar ou molhar o adesivo térmico descartável.

Precauções com o uso de Biofenac HOT:

- Não se recomenda o uso de Biofenac HOT em situações em que possa aumentar o efeito de aquecimento local (por exemplo, roupas muito justas ou bandagens).
- Se ocorrer a sensação de calor desconfortável, remova o adesivo térmico descartável no mesmo momento.
- Apenas para uso externo.
- Não ingerir. Os ingredientes internos podem ser prejudiciais à saúde. Se o conteúdo interno for engolido ou entrar em contato com os olhos, lave-os com água abundante e procure assistência médica imediatamente.
- Jogue fora o adesivo térmico descartável após o uso.
- Armazene em local seco e fresco.
- Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

PRODUTO DE USO ÚNICO.

NÃO REUTILIZAR.

CONSERVAR EM LUGAR SECO E FRESCO.

Armazenamento e validade:

O vencimento é indicado em cada embalagem individual.



biofenac.com.br

EMPL150039400 08/14 RO 01