



INSTRUÇÃO DE USO
SOLUÇÃO ESTÉRIL PARA LENTES DE CONTATO
 Solução Para Uso Oftalmológico

SOLUÇÃO ÚNICA COM ANTIDEPÓSITOS DE PROTEÍNAS PARA TODOS OS TIPOS DE LENTES DE CONTATO HIDROFÍLICAS (incluindo a nova geração de lentes de silicone hidrogel)

- LIMPEZA
- DESINFECÇÃO
- LAVAGEM
- CONSERVAÇÃO
- HIDRATAÇÃO
- ANTIDEPÓSITOS DE PROTEÍNAS

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Solução aquosa, isotônica e tamponada, com poloxamer, EDTA, PVP, polihexanida 0,0002% e agente removedor de proteínas.

APRESENTAÇÃO:

1 frasco com 350 mL + 1 frasco com 120mL + 1 porta lentes de contato.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Antes de manipular as lentes, lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão.
 2. Retirar a lente do olho, colocá-la sobre a palma da mão com algumas gotas de All Clean Soft, e friccionar* ambas as faces durante alguns segundos.
 3. Enxaguar ambas as faces da lente durante pelo menos 5 segundos com All Clean Soft.
 4. Depositar cada lente no compartimento correspondente e encher o estojo das lentes com All Clean Soft até cobrir completamente as lentes. Fechar o estojo e agitá-lo durante alguns segundos.
 5. Manter as lentes imersas na solução pelo menos 4 horas, ou durante a noite, para assegurar uma completa desinfecção.
 6. Depois de concluído o processo, colocar a lente diretamente no olho ou enxaguá-la previamente com All Clean Soft se desejar.
 7. Enxague o estojo das lentes com All Clean Soft e deixe-o secar ao ar.
- *Não é necessário friccionar as lentes descartáveis (≤30 dias)

PRECAUÇÕES:

- Após a abertura do frasco, não utilizar depois de passados 90 dias.
- Manter o frasco bem fechado.
- Não utilizar o produto sem o selo de esterilidade ou rasgado.
- Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças.
- Pode conservar as suas lentes na solução, no porta-lentes fechado, até 30 dias.
- Conservar à temperatura ambiente.
- Não tocar com o dosador em nenhuma superfície para evitar que se contamine.
- Em caso de irritação ocular, consultar um especialista.
- Antes de utilizar um medicamento oftálmico, informe o seu médico de que é usuário de lentes de contato.
- Não utilize em caso de alergia a qualquer dos seus componentes.
- Não utilizar nunca água da torneira para enxaguar o estojo das lentes.
- Não utilizar depois do prazo de validade.
- Deve renovar a solução do porta-lentes depois de cada utilização.
- O seu oftalmologista poderá recomendar o uso de produtos adicionais ou mudanças no processo de limpeza de acordo com a avaliação da sua lágrima, tipo de lentes e tipo de substituição. Siga sempre as instruções do oftalmologista e não altere as instruções de uso sem o consultar previamente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO:

Armazenar em temperatura ambiente.

FABRICADO POR:

AVIZOR, S.A.
 La Cañada, 17
 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid – Espanha

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.
 Rua Batataes, nº 391, 1º andar – conjuntos 11, 12 e 13
 Jardim Paulista – São Paulo
 CNPJ: 04.718.143/0001-94
 Responsável Técnico: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre
 CRF/SP 21.079
 Registro ANVISA nº: 80102511827

COMERCIALIZADO POR:

Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
 Hortolândia/SP
 www.legrandpharma.com.br
 SAC 0800 – 500600



085399

134 mm

200 mm

Código do Material: 085399

Dimensões: 134 x 200 mm Programa: Adobe Illustrator CC 2017
 Material: Papel sulfite 45 g/m² Prova nº: . 04Final 14/12/2017
 Cores: Black Designer: Vinicius
 Laetus: 674 **Legrand similar**
 Fonte: 9 Espaçamento: 9

APROVAÇÃO DE ARTE FINAL

ÁREA	VISTO	DATA
Depto. Marketing:	_____	_____
Depto. Registro:	_____	_____
Desenv. Emb.:	_____	_____

Modelo: XXXXX
 REF Troquel: TRO-PROS-015
 Dimensiones: 200 x 134 mm
 Código: PROS

Colores:

