

## INSTRUÇÃO DE USO

### OPTI-FREE\* PUREMOIST\*

Solução de Desinfecção Multipropósito (logo)

Estéril

Por favor, leia cuidadosamente e guarde esta instrução de uso para uso futuro caso seja necessário.

**16 horas de lentes hidratadas proporcionando conforto desde a colocação das lentes até a sua remoção.**

Limpa, recondiciona, enxagua, desinfeta e conserva.

Remove depósitos de proteínas.

Reduz a deposição lipídica.

Para todas as lentes de silicone hidrogel e gelatinosas.

### MODO USO

#### Instruções Gerais:

- Sempre lave e enxágue inteiramente as mãos e seque-as com uma toalha livre de fiapos antes de manusear suas lentes de contato.
- Limpe, lave e desinfete suas lentes a cada vez que removê-las.
- Não exponha suas lentes de contato à água não-estéril enquanto as estiver usando.

#### Instruções de Uso:

Para melhores resultados, siga estas instruções para limpar, recondicionar, desinfetar, remover proteínas, enxaguar e armazenar suas lentes:

1. Umidifique inteiramente cada lado da lente com **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito**.
2. Friccione cada lado da lente durante 10 segundos (para um total de 20 segundos de fricção).
3. Enxágue cada lado das lentes com um fluxo constante de **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** por 10 segundos (para um total de 20 segundos de enxague).
4. Preencha seu estojo de lentes ALCON com uma solução nova de **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito**. Armazene as lentes no estojo fechado durante a noite ou por pelo menos 6 horas. Após este procedimento, as lentes estão prontas para o uso.

Se qualquer detrito permanecer nas lentes de contato, enxágue com **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** antes de inserí-las nos olhos. Você pode deixar suas lentes no estojo de lentes fechado contendo **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** por até 30 dias. Após este período, suas lentes devem ser limpas e desinfetadas novamente com **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** repetindo o procedimento do Modo de Uso. Sempre siga as instruções do seu oftalmologista. Não altere as instruções para o cuidado de suas lentes ou para o cuidado da solução

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** sem consultar o seu oftalmologista.

## **DESCRIÇÃO**

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** é uma solução estéril, tamponada, aquosa contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, edetato dissódico, dois agentes umidificantes (TETRONIC® 1304† e HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante (polioxietileno-polixibutileno), os conservantes POLYQUAD\* (poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX\* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006% e água purificada. HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante é um bloco de copolímero com propriedade multifuncional desenvolvida principalmente para umidificar e lubrificar lentes de silicone hidrogel. Também pode conter ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para ajustar o pH.

## **AÇÕES**

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** quando utilizado conforme instruções

- Limpa reduzindo depósitos de lipídios e removendo depósitos de proteínas de suas lentes durante a desinfecção e conservação.
- Contém POLYQUAD\* e ALDOX\*, dois agentes de desinfecção biocompatíveis com atividade contra microorganismos prejudiciais (bactéria, fungo e *Acanthamoeba*), que podem causar infecções oculares.
- É usado para enxaguar e recondicionar suas lentes de contato de silicone hidrogel e gelatinosas (hidrofílicas).
- É formulado para desinfetar e conservar lentes por até 30 dias depois da última desinfecção.

## **Benefícios da umidificação, lubrificação, hidratação e limpeza para o uso das lentes**

### **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito:**

- Proporciona 16 horas de umidificação duradoura mantendo seu conforto por todo o dia. HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante funciona independentemente do seu filme lacrimal mantendo a hidratação de suas lentes e proporcionando um conforto prolongado nas lentes, desde a sua colocação até a remoção.
- Mantém uma camada umidificante protetora que permite que a sua pálpebra deslize sobre a superfície das lentes sem irritação.
- Mantém as lentes hidratadas durante todo o dia.
- Liga-se às áreas secas das lentes para reduzir a deposição de lipídios.
- Reduz a deposição de lipídios e remove depósitos de proteínas para limpeza e frescor das lentes.

## **INDICAÇÕES E USO**

Para uso diário na limpeza, recondicionamento, enxague, redução dos depósitos de lipídios e remoção dos depósitos de proteínas, desinfecção química (não térmica) e conservação de lentes de contato de silicone hidrogel e gelatinosas (hidrofílicas), de acordo com a recomendação do seu médico.

## **CONTRAINDICAÇÕES (Razões para não usar)**

Não usar este produto se você for alérgico a qualquer ingrediente presente no **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito**.

### **ADVERTÊNCIAS**

Siga as instruções do seu oftalmologista e todas as instruções de rotulagem para o uso apropriado de suas lentes e dos produtos que cuidam de suas lentes, incluindo o estojo. Não reutilize ou “complete” a solução presente no estojo de lentes, pois isso pode reduzir a eficácia de desinfecção da lente. Problemas oculares, incluindo infecção ou úlcera corneal, podem se desenvolver rapidamente e levar à perda da visão. Se você sentir desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, alterações visuais ou vermelhidão nos olhos, retire as suas lentes imediatamente e consulte o seu oftalmologista, uma vez que o problema pode se tornar mais sério.

### **PRECAUÇÕES**

- Não use se o lacre do produto estiver danificado ou ausente antes da primeira abertura.
- Sempre use uma nova solução de **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito**. Nunca reutilize a solução do seu estojo de armazenamento de lentes.
- Para evitar contaminação, nunca toque a ponta do frasco em qualquer superfície.
- Recoloque a tampa após o uso.
- Mantenha o frasco bem fechado quando não estiver em uso.
- Use antes da data de validade informada na embalagem.
- Descarte qualquer quantidade de solução não-utilizada em 6 meses após a primeira abertura.
- Não utilizar para desinfecção por calor (térmica).
- Armazene em temperatura ambiente (de 15 °C à 30 °C).
- Mantenha fora do alcance das crianças.

### **REAÇÕES ADVERSAS**

Se você apresentar desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, alterações visuais ou vermelhidão dos olhos, retire suas lentes imediatamente. Consulte o seu oftalmologista para identificar o problema e busque tratamento para evitar lesões sérias aos olhos. Uma infecção pode estar presente e, se não tratada, pode levar à perda de visão.

### **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30°C).

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** é esterilizado por filtração e está disponível em frascos plásticos estéreis. O frasco e o cartucho são marcados com o número de lote e a data de fabricação.

### **APRESENTAÇÕES**

**Comercial:** 60 mL, 90 mL, 120mL, 300mL, 420mL e 470mL.

**Amostra grátis:** 60 mL, 120 mL e 300 mL.

**Kit Promocional:** 300 mL + 120 mL

**PRAZO DE VALIDADE**

A validade das apresentações comerciais de 60 mL, 90 mL, 120mL, 300mL, 420mL e 470mL é 24 meses.

A validade da apresentação de 60mL (amostra grátis) é 21 meses.

Lote, fabricação e validade: vide cartucho

Reg. ANVISA: 80153480094

**Fabricado por:**

ALCON LABORATORIES, INC.

6201 South Freeway

Fort Worth, Texas

76134, EUA

**Importado e distribuído por:**

NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.

Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06 Tamboré

CNPJ 56.994.502/0015-35

Ou

Avenida Tanner de Melo s/nº, Quadra 06, Área 02

PARQUE IND. VP JOSÉ ALENCAR - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

CNPJ: 56.994.502/0025-07

Indústria Brasileira

**Origem do produto:**

Estados Unidos da América

Processo de esterilização usado na fabricação: filtração

Resp. Técnico: Victor A. C. Lopes - CRF-SP nº 74569

† TETRONIC® é uma marca de BASF

\* Marca de Novartis

SAC: 0800-7077908

sac.brasil@alcon.com

Alcon®

© 2017 Novartis

www.br.alcon.com

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\***

Solução de Desinfecção Multipropósito (logo)

Estéril

Consulte as instruções de uso para maiores orientações e informações importantes de segurança.

As instruções de uso estão impressas no interior do cartucho.

Conforto da manhã até a noite – 16 horas comprovadas de hidratação.

Limpeza e desinfecção avançada.

Conforto o dia todo.

Hidratação prolongada.

Recondiciona e retém hidratação.

Clinicamente comprovado.

Conforto prolongado.

Conforto desde a inserção até a remoção da lente.

Hydraglyde\* Matriz Umidificante proporciona uma camada lubrificante de hidratação.

Fórmula suave e eficaz que mata germes.

Remove depósitos de proteínas.

Reduz a deposição lipídica.

Limpa, recondiciona, enxagua, desinfeta e conserva.

Para todas as lentes de contato de silicone hidrogel e gelatinosas.

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** é clinicamente comprovado, contendo Hydraglyde\* Matriz Umidificante que reveste a lente com um escudo de hidratação que dura da manhã até a noite.

Somente **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** contém HYDRAGLYDE\* matriz Umidificante que proporciona 16 horas de lentes hidratadas mantendo conforto por todo o dia.

**DESCRIÇÃO**

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multi-Propósito** é uma solução estéril, tamponada, aquosa contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, edetato dissódico, dois agentes umidificantes (TETRONIC® 1304† e HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante (polioxietileno-polixibutileno), os conservantes POLYQUAD\* (poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX\* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006% e água purificada. HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante é um bloco de copolímero com propriedade multifuncional desenvolvida principalmente para umidificar e lubrificar lentes de silicone hidrogel. Também pode conter ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para ajustar o pH.

## **DESINFECÇÃO DUPLA BIOCAMPATÍVEL**

**POLYQUAD\*** e **ALDOX\*** fórmula de desinfecção avançada tem atividade contra bactéria, fungo e *Acanthamoeba* que podem causar infecções oculares.

## **LENTESS HIDRATADAS**

Para uma melhor hidratação e limpeza das lentes, preencha o estojo de lentes com solução nova todas as vezes que as lentes forem conservadas. Nunca reutilize a solução. Isto ajudará a atingir o máximo de hidratação na superfície das lentes por todo o dia, se usada adequadamente.

## **ADVERTÊNCIAS**

Reutilizar a solução ou usar água com as lentes de contato podem contaminá-las, resultando em sérios danos aos olhos e potencial perda da visão. Veja as instruções de uso dentro do cartucho para instruções completas e informação adicional importante de segurança.

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multi-Propósito** contém **HYDRAGLYDE\*** Matriz Umidificante e é uma fórmula patenteada que foi especialmente desenvolvida para:

- Proporcionar 16 horas de hidratação.
- Remove depósitos de proteínas.
- Reduz a deposição lipídica.
- Fórmula suave e eficaz que mata germes.

## **BOAS PRÁTICAS EM CUIDADOS COM LENTES DE CONTATO**

Siga sempre as instruções de uso.

Use somente solução nova para limpar e desinfetar as lentes de contato.

Descarte qualquer solução restante do estojo de lentes após a desinfecção. **NUNCA REUTILIZE SOLUÇÃO.**

Não utilize **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multi-Propósito** se você é alérgico a qualquer um dos seus componentes.

## **LACRE DE SEGURANÇA**

Para sua proteção, o frasco possui lacre de segurança ao redor do gargalo do frasco. Não use se o lacre estiver danificado ou se o frasco não contiver o lacre no momento da compra. Remova completamente o lacre do frasco antes do uso.

## **COMO FUNCIONA**

1. No estojo de lentes, **HYDRAGLYDE\*** Matriz Umidificante se incorpora e se espalha na superfícies das lentes para mantê-las hidratadas ao longo do dia.
2. **HYDRAGLYDE\*** Matriz Umidificante proporciona uma camada contínua de umidade para o conforto desde a colocação até a remoção das lentes.

CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30 °C).

Use antes da data de validade marcada no produto.

Depois de aberto, descartar qualquer solução remanescente após seis meses.

Processo de esterilização usado na fabricação: filtração.

Reg. ANVISA: 80153480094

**Fabricado por:**

ALCON LABORATORIES, INC.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas  
76134, EUA

**Importado e distribuído por:**

NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.  
Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06 Tamboré  
CNPJ 56.994.502/0015-35

Ou

Avenida Tanner de Melo s/nº, Quadra 06, Área 02  
PARQUE IND. VP JOSÉ ALENCAR - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 56.994.502/0025-07  
Indústria Brasileira

**Origem do produto:**

Estados Unidos da América

Resp. Técnico: Victor A. C. Lopes - CRF-SP nº 74569

SAC: 0800-7077908  
sac.brasil@alcon.com

† TETRONIC® é uma marca registrada da BASF

\* Marca de Novartis

Alcon®

Lote:  
Fab.:  
Val.:

© 2017 Novartis

www.br.alcon.com

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\***

Solução de Desinfecção Multipropósito

Estéril

Consulte as instruções de uso para maiores orientações e informações importantes de segurança.

Limpa, recondiciona, enxagua, desinfeta e conserva.

16 horas de lentes hidratadas.

Remove depósitos de proteínas.

Reduz a deposição lipídica.

Para todas as lentes de contato silicone hidrogel e gelatinosas.

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** foi especialmente desenvolvida para proporcionar:

- 16 horas de hidratação.

- conforto desde a colocação das lentes até sua remoção.

- camada umidificante protetora das lentes.

Para melhores resultados, siga as instruções para o cuidado de suas lentes descritas no cartucho e nas instruções de uso. Para melhores resultados, preencha o estojo com solução nova todas as vezes que as lentes forem conservadas. Nunca reutilize a solução. Isto ajudará a atingir o máximo de hidratação na superfície das lentes por todo o dia se usadas adequadamente. Você pode conservar suas lentes no estojo de lentes fechado por até 30 dias.

Sempre siga as orientações do seu oftalmologista.

**DESINFECÇÃO DUPLA BIOCAMPATÍVEL**

POLYQUAD\* e ALDOX\* fórmula de desinfecção avançada tem atividade contra bactéria, fungo e *Acanthamoeba* que podem causar infecções oculares.

**ADVERTÊNCIA**

Reutilizar a solução ou utilizar água com as lentes de contato podem contaminá-las, resultando em sérios danos aos olhos e potencial perda de visão.

Não utilize **OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multi-Propósito** se você é alérgico a qualquer um dos seus componentes.

Use antes do prazo de validade informado na embalagem.

**DESCRIÇÃO**

**OPTI-FREE\* PUREMOIST\* Solução de Desinfecção Multipropósito** é uma solução estéril, tamponada, aquosa contendo citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, edetato dissódico, dois agentes umidificantes TETRONIC® 1304† e HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante

(polioxietileno-polixibutileno), os conservantes POLYQUAD\* (poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX\* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0006% e água purificada. HYDRAGLYDE\* Matriz Umidificante é um bloco de copolímero com propriedade multifuncional desenvolvida principalmente para umidificar e lubrificar lentes de silicone hidrogel. Também pode conter ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio para ajustar o pH.

Se você for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula, não utilize este produto.

Depois de aberto, descartar qualquer solução remanescente após seis meses.

### **LACRE DE SEGURANÇA**

Para sua proteção, o frasco possui um lacre de segurança ao redor do gargalo. Não use se o lacre estiver danificado ou se o frasco não contiver o lacre no momento da compra. Remova completamente o lacre do frasco antes do uso.

CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 a 30 °C).

Processo de esterilização usado na fabricação: filtração

Reg. ANVISA: 80153480094

### **Fabricado por:**

ALCON LABORATORIES, INC.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas  
76134, EUA

### **Importado e distribuído por:**

NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.  
Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06 Tamboré  
CNPJ 56.994.502/0015-35

Ou

Avenida Tanner de Melo s/nº, Quadra 06, Área 02  
PARQUE IND. VP JOSÉ ALENCAR - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 56.994.502/0025-07  
Indústria Brasileira

### **Origem do produto:**

Estados Unidos da América

Resp. Técnico: Victor A. C. Lopes - CRF-SP nº 74569

SAC: 0800-7077908  
sac.brasil@alcon.com

© 2017 Novartis

† TETRONIC® é uma marca registrada da BASF

\* Marca de Novartis

Alcon®

Lote:

Fab.:

Val.:

[www.br.alcon.com](http://www.br.alcon.com)

---

Milena Gutierrez Chaw  
Representante Legal

---

Victor A. C. Lopes  
Resp. Técnico: CRF-SP nº 74569